


armi
AKTIIVITUOLI

Armi Lite


Armi Lite-aktiivituoli on muotoilultaan kevyt, moderni ja skandinaaviseen makuun niin kotiin kuin julkitiloihinkin tyylikkäästi sopiva ergonominen ja monipuolinen nousua avustava lääkinällinen tuoli.



Ristiselän tuki.
Selän kaarevuuden mukaan muotoutuva istuimen selkä.

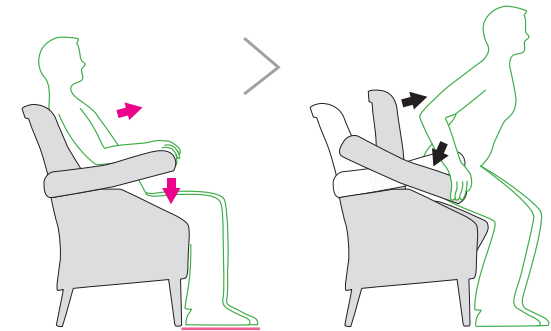

1. Jalkapohjat lähellä tuolin etureunaa. 2. Kallista ylävartaloa reilusti eteen ja paina käsinojia kevyesti. 3. Istuinosa kallistuu nostoen vartaloa ylöspäin ja käsinojat liikkuvat alaspäin. 4. Jatka liikettä yläviistoon seisoma-asentoon. Lopuksi istuinosa ja käsinojat palautuvat alku-asentoon ja lukittuvat.

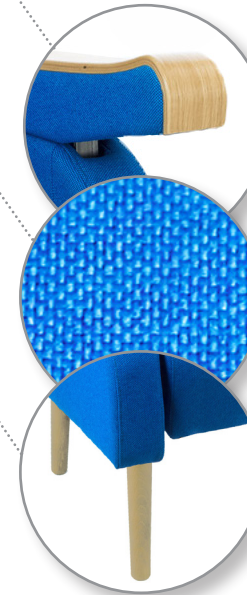

Ergonomisesti muotoiltu kyynärnoja lepuuttaa rannetta luontevassa asennossa. Antaa tukea istuessa sekä noustessa. Saatavana myös puisilla kädensijoilla, tammi tai pähkinä.

Useita pinta- ja väri vaihtoehtoja. Useita värejä ja kuoseja. Kangasta tai nahkaa tarpeen mukaan. Valikoima erilaisia suojia.



Saatavana:

- Puujaloilla / tammi tai pähkinä
- Laippajalka / kromattu metalli

Istuinkorkeus määräytyy nelijalkaisena jalkojen pituuden mukaan, ja laippajalkaisena säädettävissä kaasujousella.

”Sopii myös hyvän ergonomian työtuoliksi, jossa teet pientä taukojumppaa melkein kuin huomaamatta.

Materiaalit

mekaniikka metalli
runko vaneri
jalat - puu (tammi)
- laippajalka
kädensijat kangas ta puu
pehmuste vaahtomuovi
kiinnikkeet metalliruuveja

Mitat ja tekniset tiedot

Paino puujaloilla / laippajalalla 22 / 26 kg
Tuolin leveys 66 cm
Tuolin korkeus - riippuu säädöistä 75-108 cm
(norm. n.90 cm)
Istuinkorkeus cm / hlön pituus cm 39-55 cm
Tuolin kokonaissyvyys 60 cm

Istuimen sisäsyvyys 42 cm
Istuimen sisäleveys 49 cm
Käsinojan leveys 7 cm
Käsinojan pituus 50 cm
Ristiselkää tukevan selkänokan kork. 48 cm
Tuolilta nousijan minimipaino 30 kg
Tuolin viemä lattia-pinta-ala 66 x 60 cm.



AKTIIVITUOLI

Armi Lite



“Fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa huomattavasti ikääntyneen toimintakykyyn, itsenäiseen selviytymiseen, sairauksien ehkäisyyn ja elämän laadun parantamiseen.

Toiminta

Tuolin mekaniikka ohjaa käyttäjän luonnolliseen ylösnousuasentoon ilman ulkoista voimaa. Tämä mahdollistaa jalkojen isojen lihasten ja käsivarsien hyödyntämisen tuoilta noustessa. Tuoilta nousu tuntuu kevyemmältä ja niveliin sekä alaselkään kohdistuva kuormitus pienenee.

Tuolin käyttö aktivoi ja vahvistaa lihaksia kuin huomautta. Kohentunut lihaskunto parantaa toimintakykyä ja tasapainoa, jota tarvitaan arjessa selviytymiseen.

Aktiivituolin käyttö ennaltaehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia tuki- ja liikuntaelinvaijoja ja antaa lisää aktiivisia vuosia.

Armin patentoitu mekaniikka keventää myös hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien työtä, ja sopii eritasoiseen kuntoutukseen, tarjoten jumppa- sekä harjoitusohjelmia.

Armi ei ole hetken helpotus vaan pitkäkestoinen hyöty, joka parantaa tuolin käyttäjän toimintakykyä kaikissa muissakin arkielämän tilanteissa.

Sopii erityisesti paikkoihin joissa asuu tai vierailee paljon ikäihmisiä, muutoin heikkovoimaisia tai vaivaisia.

Luokitus

- Armi on CE-hyväksytty lääkinällinen laite
- Tuoli on MD-asetuksen MDR 2017/745 luokan 1 (CE) mukainen lääkinällinen laite ja sille on tehty SFS-EN ISO 14971 standardin mukainen riskikartoitus.
- Materiaalit ja rakenteen vastaavat Suomen ja EU:n asettamia vaatimuksia.
- ISO 9999 apuvälineluokituskoodit 18 09 09 ja 18 09 15
- FIMEA: Lääkinälliset laitteet - laiterekisterissä 8.12.2016 alkaen

Verhoilu

Suositus hoiva- ja julkistiloihin
Pintailin Healthcare Ancona -verhoilulla.
Tiedot, katso:
<http://pintail.nl/en/product/ancona/>

Martindale >100.000, pestävä, vedenpitävä,
palonkestävä, bakteeriresistanssi

Määriteltäessä joku muu kangas on huomioitava
mm. kankaan käyttö- ja huolto-ominaisuudet.

